

Guide d'utilisation

Tutoriel vidéo : <https://youtu.be/LqMOpQhjpUM>

MASQUE A USAGE NON SANITAIRE (UNS1)

Norme AFNOR SPEC S76-001

Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information du 26 mai 2020

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires LPMT et LGRE en accord avec la DGE sous recommandation de la DGA :

- Efficacité de filtration des particules de $3\mu\text{m}$ = 92 %
- Perméabilité à l'air pour une dépression de 100Pa > 96 L.m⁻².s⁻¹
- Il résiste à 50 cycles complets de lavage de minimum 30 minutes à 60°

Avertissement :

- Le masque Labonal est composé d'un masque en maille lavable
- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Le masque est à changer toutes les 4 heures.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière phy-

Pour le mettre :

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Tenez le masque par les deux lanières, placez-le au niveau de votre bouche
- Passez les lanières derrière les oreilles
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche, le menton.

Lorsque vous le portez :

- Eviter de le toucher et de le déplacer
- Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton

Pour l'enlever :

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque du visage
- En attendant de laver le masque en maille, isolez-le dans un sac en plastique
- Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

ENTRETIEN :

- Lavage après utilisation à 60° pendant 30 minutes minimum
- Repassage à 120°

Avant de démarrer la mise en place du masque, voici deux photos pour vous indiquer le sens du masque tricoté.

Haut



Bas

Etape 1 :

Les oreillettes sont déjà formées. Cependant si besoin, il vous suffit de passer le masque au fer à repasser vapeur afin qu'elles prennent forme.

Attention : il est possible qu'après lavage, vous devriez couper les pointillés afin d'être plus à l'aise.

Etape 2 :

Saisissez les lanières et passez-les derrière vos oreilles, veillez à ce que votre bouche, nez et menton soit couvert.



Vous pouvez à présent porter votre masque !